

Инструкция по обновлению программного обеспечения регистратора 12100.02.

Обновление программного обеспечения (ПО) регистратора может осуществить сам пользователь без особых усилий.

1. Чтобы обновить ПО регистратора сначала скачайте файл zip-архива "12100.02_26.04.2021.zip" на компьютер и откройте его,
в архиве находятся три файла "config.ini", "firmware.bin", "fw_ecg.bin".
Эти файлы необходимо скопировать на карту памяти регистратора.
2. Для этого подключите регистратор с установленной картой памяти, но без батареи к компьютеру через USB-кабель.
3. Карта памяти регистратора станет доступна в окне проводника "Этот компьютер" как обычная флешка с названием "Съемный диск" или "USB-накопитель".
4. В окне проводника выберите "Этот компьютер" и откройте карту памяти регистратора (как обычную флешку).
5. Удалите с карты памяти регистратора все файлы (если все исследования уже были считаны).
6. Скопируйте на карту памяти три файла:
firmware.bin
fw_ecg.bin
CONFIG.INI
7. Отключите регистратор от компьютера.
8. Установите батарею в регистратор с установленной картой памяти.
9. На экране регистратора увидите надпись:
Firmware update
Chek MD5 0-100% OK
Flashing 0-100% OK
Flashing 0-100% OK
10. Проверьте дату и версию ПО регистратора, для этого на регистраторе откройте меню Сервис - Служебный - О приборе:
- Версия - 1,56
- Дата 26.04.2021